



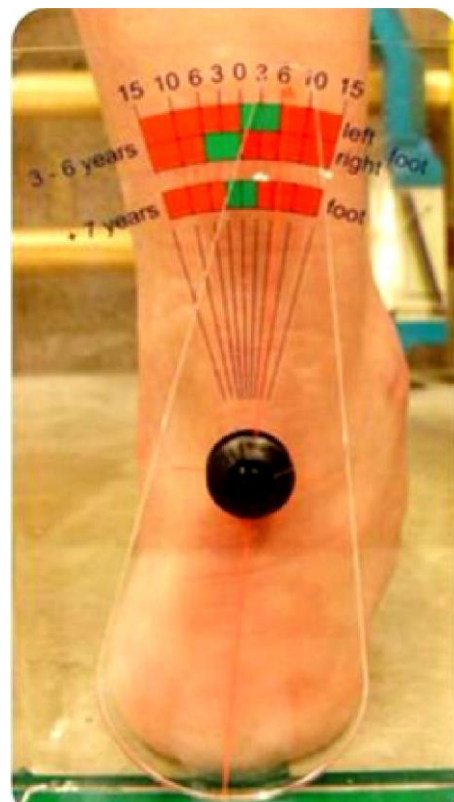

FOOT – RISK – FINDER BORGinsole:

Manuel

1. Laissez la personne à tester se maintenir, dans une position "normale" et à l'aise;
2. Placez le mètre derrière le calcaneum;
3. Poussez la goutte du mètre de manière que ce mètre suive parfaitement la forme du calcaneum;
 - a. Plié vers l'intérieur ou vers l'extérieur
4. Lisez la valeur selon l'échelle d'âge ;
 - a. Le **rouge** signifie que l'avis d'un podologue est nécessaire (www.borginsole.com)
 - b. Le **vert** est parfaitement acceptable et ne nécessite pas un suivi.

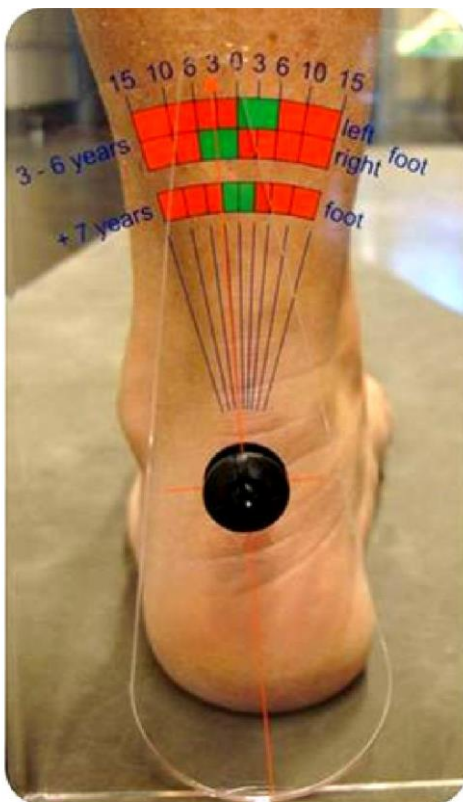

Par exemple : un enfant de 7 ans (ou plus)

Normale

Avis est nécessaire

Nous utilisons une formule afin de déterminer le RCSP acceptable chez enfants jusqu'à 7 ans : (âge x 2) – 14

Par exemple 4 ans : $4 \times 2 = 8 - 14 = -6$ RCSP acceptable

Vous pouvez trouver un podologue dans votre région : www.BORGinsole.com