
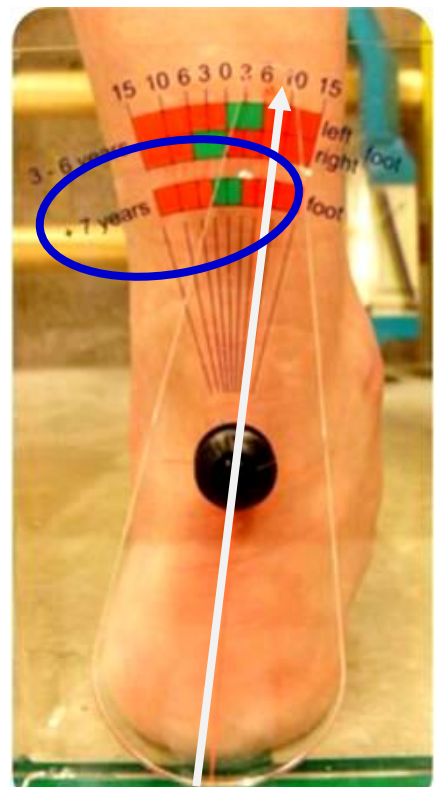


FOOT – RISK – FINDER BORGinsole:

Handleiding

1. Laat de te testen persoon ontspannen staan, in een “normale” comfortabele stand
2. Plaats de meter achter het hielbeen.
3. Schuif de druppel van de meter zodat deze perfect de vorm van het hielbeen volgt
 - a. Naar binnen of naar buiten geknikt.
4. Lees de waarde af volgens de leeftijdschaal.
 - a. **Rood** staat voor advies vragen aan BORGinsole podoloog (www.borginsole.com)
 - b. **Groen** is perfect aanvaardbaar en vergt geen verdere opvolging

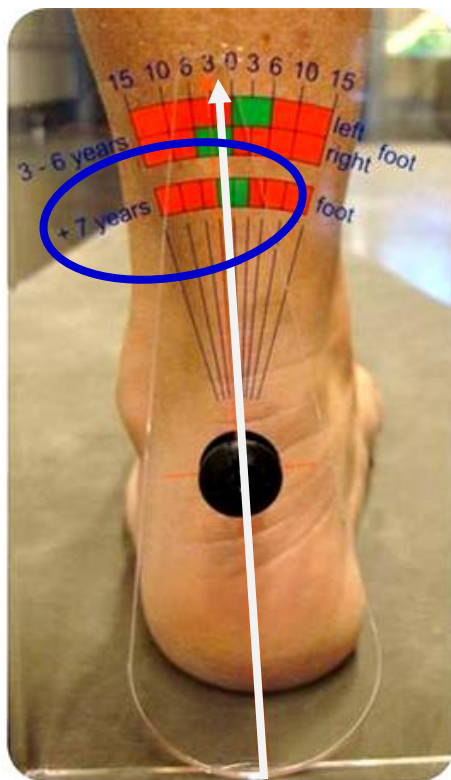

Voorbeeld voor persoon van 7 jaar (of ouder)

Normaal

Advies gewenst

We gebruiken een formule om de aanvaardbare OCS te bepalen bij kinderen tot 7 jaar
(Leeftijd x 2) – 14

Vb 4 jaar: $4 \times 2 = 8 - 14 = -6$ OCS aanvaardbaar

Je vindt vast een BORGinsole Podoloog in je buurt : www.borginsole.com

De **Foot-Risk-Finder (FRF)** is een klinisch meettoestel dat **achter de belaste hiel** wordt geplaatst om de **stand van het calcaneum** snel en reproduceerbaar te objectiveren, zonder dat een **bisectrice** moet worden bepaald.

De **druppelvorm** geleidt de herkenning en positionering van het calcaneum, zodat zowel **RCSP** (*Relaxed Calcaneal Stance Position*) als **NCSP** (*Neutral Calcaneal Stance Position*) efficiënt kunnen worden beoordeeld / gemeten.

Het toestel is zo ontworpen dat het **zelfstandig rechtop blijft staan**, waardoor de onderzoeker **beide handen vrij** heeft om via **palpatie** de NCSP beter te bepalen en tegelijk een bredere observatie te doen van **voet, onderbeen en globale houding** vanop een afstand van de patiënt.

De FRF is inzetbaar bij **kinderen én volwassenen**.

Bij kinderen in de groei biedt de FRF een praktische manier om de **verticalisatie van het calcaneum** te volgen en het **evolutieve karakter** van de stand te objectiveren, typisch in de ontwikkeling van **2 tot 7 jaar**.

De leeftijdsindicatie formule (**leeftijd × 2 – 14**) is **geen absolute norm** en dient niet om wetenschappelijk “normaal” versus “abnormaal” als vaste grens te definiëren.

Ze is bedoeld als **informatieve groeirichting**: een hulpmiddel om de verwachte **evolutie naar een meer verticale calcaneusstand** zichtbaar te maken.

De naam **Foot-Risk-Finder** benadrukt het doel: **extreme afwijkingen detecteren** en als **laagdrempelig screeningsinstrument** ondersteunen bij de beslissing of **extra advies door een podoloog** aangewezen is, vooral voor niet-podologen.

Praktisch betekent dit: een duidelijke afwijking die **niet past bij de leeftijdsgebonden groeirichting** (bv. uitgesproken “positieve” OCS-waarden op jonge leeftijd) is een signaal om **tijdig door te verwijzen** voor podologisch onderzoek.

Het toestel kan dus zowel gebruikt worden door de therapeut / podoloog om te meten; als door niet professionals om een mogelijk risico te objectiveren voor doorverwijzing. Doorverwijzing houdt niet persé in dat er behandeling nodig is.