
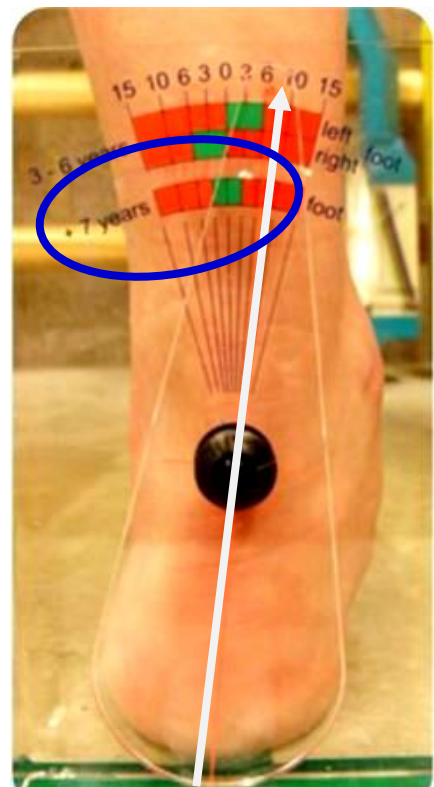


FOOT – RISK – FINDER BORGinsole:

Handleiding

1. Laat de te testen persoon ontspannen staan, in een “normale” comfortabele stand
2. Plaats de meter achter het hielbeen.
3. Schuif de druppel van de meter zodat deze perfect de vorm van het hielbeen volgt
 - a. Naar binnen of naar buiten geknikt.
4. Lees de waarde af volgens de leeftijdschaal.
 - a. **Rood** staat voor advies vragen aan BORGinsole podoloog (www.borginsole.com)
 - b. **Groen** is perfect aanvaardbaar en vergt geen verdere opvolging

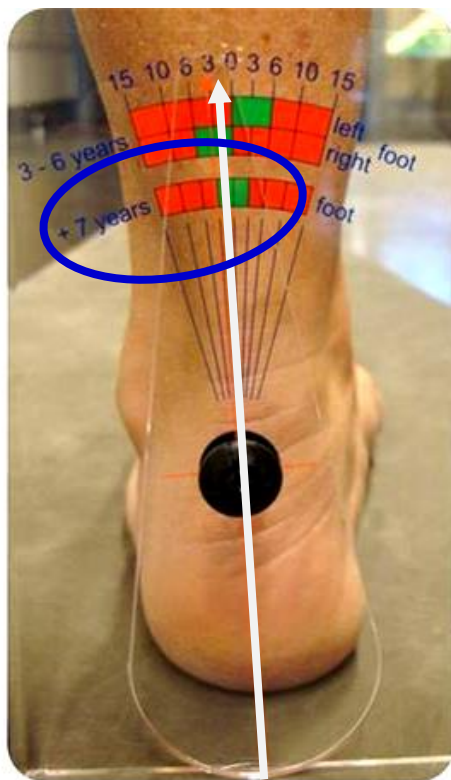

Voorbeeld voor persoon van 7 jaar (of ouder)

Normaal

Advies gewenst

We gebruiken een formule om de aanvaardbare OCS te bepalen bij kinderen tot 7 jaar
(Leeftijd x 2) – 14

Vb 4 jaar: $4 \times 2 = 8 - 14 = -6$ OCS aanvaardbaar

Je vindt vast een BORGinsole Podoloog in je buurt : www.borginsole.com